



KIT DE CAUTERIZACIÓN DE ALTA TEMPERATURA

El kit de cauterización de lujo de alta temperatura incluye un mango de alta temperatura, dos puntas no estériles finas, dos puntas no estériles anchas, dos pilas alcalinas "AA" y una caja forrada de espuma.


Una activación excesiva podría provocar un sobrecalentamiento del mango. La aplicación excesiva de fuerza en el cauterio durante el uso puede provocar que la punta se doble o se rompa.

El ciclo de trabajo recomendado es de 2 segundos encendido y 6 segundos apagado durante un tiempo continuo de no más de 15 minutos.


CARACTERÍSTICAS

- Propósito Médico / Indicación: Los dispositivos de cauterio Bovie® se utilizan para detener pequeños sangrados y eliminar lesiones pequeñas en piel.
- Principio de funcionamiento: Este es un dispositivo portátil accionado por una batería, que suministra energía térmica al paciente, mediante un elemento de calentamiento, usando un interruptor de activación.
- Población de pacientes: Sin restricciones.
- Condiciones del Sitio de uso: Asépticas.
- Perfil del usuario previsto: Formación - Profesional médico calificado.


ACCESORIOS

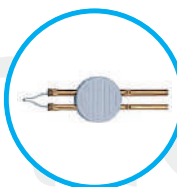


Punta fina de alta temperatura

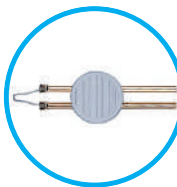

Punta ancha de alta temperatura

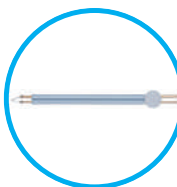

Punta ancha de alta temperatura longitud 5"

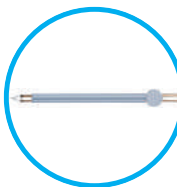

Punta fina de alta temperatura longitud 5"

► SUCURSAL LINDA VISTA

📍 Hospital Lenin Fonseca,
75 mts. al sur.

☎ 8100 1523

► SUCURSAL VILLA FONTANA

📍 Semáforo Club Terraza,
1/2 cuadra al norte.

☎ 7867 7582