



COMPRESA HUMEDO CALIENTE BACKHEAT STANDARD

Las compresas están diseñadas para brindar alivio a través de terapias no invasivas. Actúa directamente sobre la velocidad del flujo sanguíneo para prevenir o aliviar dolores musculares, de articulaciones y tendones.

PRECAUCIONES DE USO

- Si la compresa está a una temperatura muy alta, coloque siempre el paquete en una cubierta o paño antes de aplicar sobre la zona afectada.
- No usar mientras se duerme
- Probar y supervisar la compresa en el área afectada durante todo el tiempo de uso.
- Si usted tiene un problema circulatorio, consultar a un médico antes de usar una compresa .
- Deseche este producto si está roto o perforado; limpiar con un paño y agua tibia.

ESPECIFICACIONES

Materiales:	Algodón, poliéster, bentonita caly.
Dimensiones:	25.4x30.5 cm
Peso:	440 gr.

► SUCURSAL LINDA VISTA

📍 Hospital Lenin Fonseca,
75 mts. al sur.

☎ 8100 1523

► SUCURSAL VILLA FONTANA

📍 Semáforo Club Terraza,
1/2 cuadra al norte.

☎ 7867 7582